


## 1. 機器立ち上げ

● 鍵を右に回し機器を立ち上げると以下の順に画面が切り替わる。


注) 機器を立ち上げる前にハンドピース、ウォータータンクが付いている、緊急停止ボタンが押されていない事を確認してください。

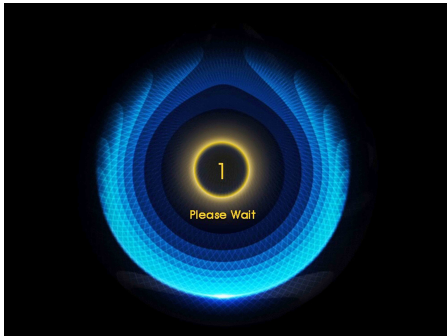

① 炎の画面



② F FROM NOW

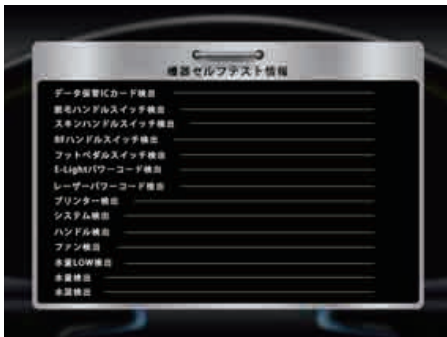

③ 各種チェック項目画面



④ OPTモード画面

## 2. パスワード入力

※ 次の画面への移行は  
パスワード入力が必要となる。



① Please enter passwordを押す。



② 現れたパスワード入力画面に  
「666666」と押し、最後にOKを押す。  
※間違えた場合、Returnを押す。



③ 再度OPT画面へ移行するので  
OPTの枠を押す。

### 3. 脱毛画面




FACE、VIO、BODY、CHILDの4つの項目があり、状況によって仕様の切替が可能。

### 4. 数値変更



- 数値を変更する場合、
- 写真①の様に画面左上の**設定マーク(歯車)**を押す。
  - 写真②の様にパスワード入力画面が現れ、**6桁の888888**→OKを押す。
  - 写真③の様にFACE、VIO、BODY、CHILD各項目を選択し、数値変更を行う。
  - 写真④の様に数値変更後、SAVE、戻るボタンの順に操作を行う。
  - 写真⑤の様に3種データが変更されている事を確認する。

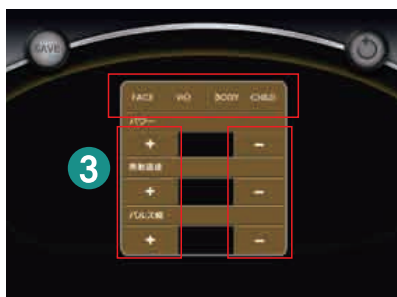

## 5. タイマー設定




- ① 写真①のタイマー枠右側を長押しすれば数値が上昇し、左側を長押しすると数値が下降する。最大値は99分となる。  
**スタートを押す前に、必ずタイマー時間を設定する。**  
設定せずにスタートボタンを押すと下画面に戻ってしまう。



戻ってしまったら、再度パスワード  
**666666**を入力する。

## 6. 施術開始

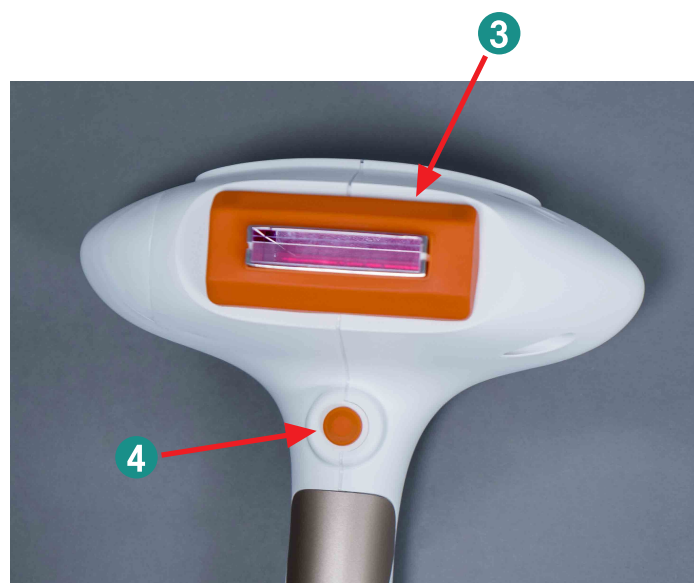

- 写真①のタイマー時間(写真①では「00」分の為、1～99分の間で設定する。タイマー設定方法:P9参照)が設定されている事を確認し、写真②のスタートを押す。
- 写真③のハンドピースクリスタル面が赤く光る。
- 写真④のハンドピース照射ボタンを押す、もしくはフットペダルを踏むと照射する。